

Příloha č. 1

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ AG TESTY

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty

a) LEPU test:

Instruktažní video: <https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20>

Instruktažní leták viz Příloha č. 3

1. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
 - Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
 - Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
2. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
 - otevírá vyhodnocovací kartu,
 - vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
 - odstraňuje lepicí proužek,
 - dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
 - otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne. Vydání testu Provedení testu Vyhodnocení testu Záznam výsledku Likvidace testu 8
3. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

b) Singclean:

Instruktažní video: <https://youtu.be/BmDnd140UH4>

Instruktažní leták viz Příloha č. 4

1. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.
2. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
 - Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
 - Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
3. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
 - Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x.
 - Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

- Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny. Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát. Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 - Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.
4. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 5. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

Vyhodnocení testu:

- Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Děti/žákovi/studentovi je umožněna účast na prezenční výuce
- Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
- Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.